



Informácia o cene na vyžiadanie

Parametre

Figuríny pre ošetrovanie - filter

Množstevná jednotka

Dospelý

ks

- Detailný popis

Figurína KERi pre auskultáciu má rovnaké vlastnosti ako kompletná figurína KERi a je navyše doplnená o auskultačné miesta so srdcovými a pľúcnyimi zvukmi. Pomocou diaľkového ovládača zvolí inštruktor zo zoznamu niektorú zo srdcových a pľúcnych chorôb. Figurína vyzerá ako skutočný pacient bez viditeľných auskultačných miest. Študent musí pohmatom nájsť správne miesto pre auskultáciu a potom počúva rôzne srdcové a pľúcne zvuky pomocou Smartskopu, ktorý prikladá na rôzne miesta na figuríne. Diagnózu stavu zvoleného inštruktorom možno stanoviť porovnaním zvukov objavujúcich sa na rôznych miestach ako u skutočného pacienta. Pľúcne zvuky možno počúvať na piatich popredných a dvanástich zadných miestach. Srdcové zvuky môže študent počúvať na šiestich popredných srdcových miestach. Jedným diaľkovým ovládačom možno nastaviť viac Smartskopů a figurín súčasne, čo je výhodné pre skupinovú výučbu. Počúvajte zvuky pomocou jednoduchých alebo duálnych naslúchadiel na Smartskopu alebo ho pripojte na reproduktor (nie je súčasťou balenia, nutné samostatne objednať: SB20146). Vzdialenosť ovládača a jednotky je obmedzená na 30 metrov.

Každý trenažér obsahuje figurínu, jeden diaľkový ovládač s LCD displejom, jeden Smartskop s jednoduchým a duálnym naslúchadlom dve batérie AA, dve batérie AAA a tvrdý úložný kufor.

Zručnosti:

- obväzovanie rán
- omývanie pacienta na lôžku
- prezlečenie pacienta
- vybratie protézy - hornej a dolnej
- výplach ucha a nasadenie audiofóny
- klystír
- výplach oka
- obväzovanie prstov na rukách aj na nohách (ohybné a jednotlivo lisované prsty)
- výplach a výživa sondou
- starostlivosti o vlasy - umývanie, česanie
- intramuskulárne miesta pre vpich na pažiach, stehnách a zadku
- možnosť pripojenia paže na meranie tlaku krvi
- možnosť pripojenia paže pre intravenózne vpich
- orálny a nazálny výplach, výživa sondou a odsávanie
- ústna hygiena
- starostlivosti o stómie - ileostómiu a kolostómiu výplach a odsávanie
- výplachy a výtery
- polohovanie pacienta
- techniky premiestňovanie pacienta
- zavádzanie nasogastrických sond
- tracheotomická starostlivosti - výplach a odsávanie
- cievkovanie močového mechúra

Srdcové stavy:

- aortálna regurgitácia
- predsieňová septálna vada
- celá fáza systoly
- stred systolickej fázy
- mitrálna stenóza
- normálny
- PDA
- pľúcna stenóza
- S3 rytmus
- S4 rytmus
- systolický tlak
- VSD

Pľúcne stavy:

- prieduškový
- dutinové dýchanie
- hrubé praskanie
- jemné praskanie
- trenie pri mazaní kože
- jednodruhový sipot
- normálne pľúca
- počúvanie zvukov reči cez hrudnú stenu
- pľúcny edém
- chrapot
- chrčanie
- sipot

Vizuálna kontrola:

- porovnanie rakovinotvorného znamienka
- ohnisko sakrálnej preležaniny

- porovnanie rozšírenej zrenice
- sčervenané kožné ohyby

Pohybový rozsah:

- členok - everzia, inverzia, dorziflexia a chodidlová flexia
- lakeť - natiahnutie, flexia, pronácia, poloha na chrbte
- prsty na rukách i na nohách - abdukcia, addukcia, flexia (jemný materiál podobný skutočnosti)
- bedro - abdukcia, addukcia, rotácia, hyperextenzia
- koleno - extenzia, natiahnutie
- krk - rotácia, hyperextenzia, laterálna flexia
- rameno - abdukcia, addukcia, rotácia, hyperextenzia
- trup - rotácia, hyperextenzia
- zápästie - flexia, hyperextenzia, radiálna flexia, ulnárna flexia

Chcete stránku vytlačiť?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobraziť všetko