

NISSIM Typ 1: Artikulátor

Objednávací kód: **4112.401184**



Cena bez DPH

302,00 Eur

Cena s DPH

362,40 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

- Pre začínajúcich a mierne pokročilých študentov
- Možno cvičiť prácu s prístrojom na určenie správneho tvaru umelého chrupu
- Ľahko použiteľný magnetický systém výmeny čeľustí

Výučba:

- vynikajúca odolnosť
- Možno cvičiť prácu s prístrojom na určenie správneho tvaru umelého chrupu
- Jednoduché pripojenie modelov čeľustí pomocou magnetov

Pripevniteľné modely čeľustí:

- Modely čeľustí s magnetickými doštičkami a artikulátormi FE / D je možné pripojiť k Nissim Typ 1 tak, ako sú.

Ako nastaviť skus na Nissim Typ 1?

- Uvoľnite ručnú skrutku hore a zosunite pohyblivú dosku, potom pripevnite hornú čeľusť
- Nastavte skus tak, že budete upravovať pozíciu pohyblivej dosky, kým sa magnet nespojí s magnetickými doštičkami na modeli dolnej čeľusti
- Utiahnete ručné skrutky