




HELAGO-SK, s.r.o.
Obchodný register Mestského súdu v Bratislave III
oddiel Sro, vložka 93626/B
Kosodrevinová 2
82107 Bratislava
IČ: 47479256, DIČ: 2023908898
Tel: 02/55565291
E-mail: info@helago-sk.sk
Web: http://www.helago-sk.sk

S315.500 HAL® Trenažér CPR + D pre nácvik KPR - dospelý
Objednávací kód: **4108.S315500M2**

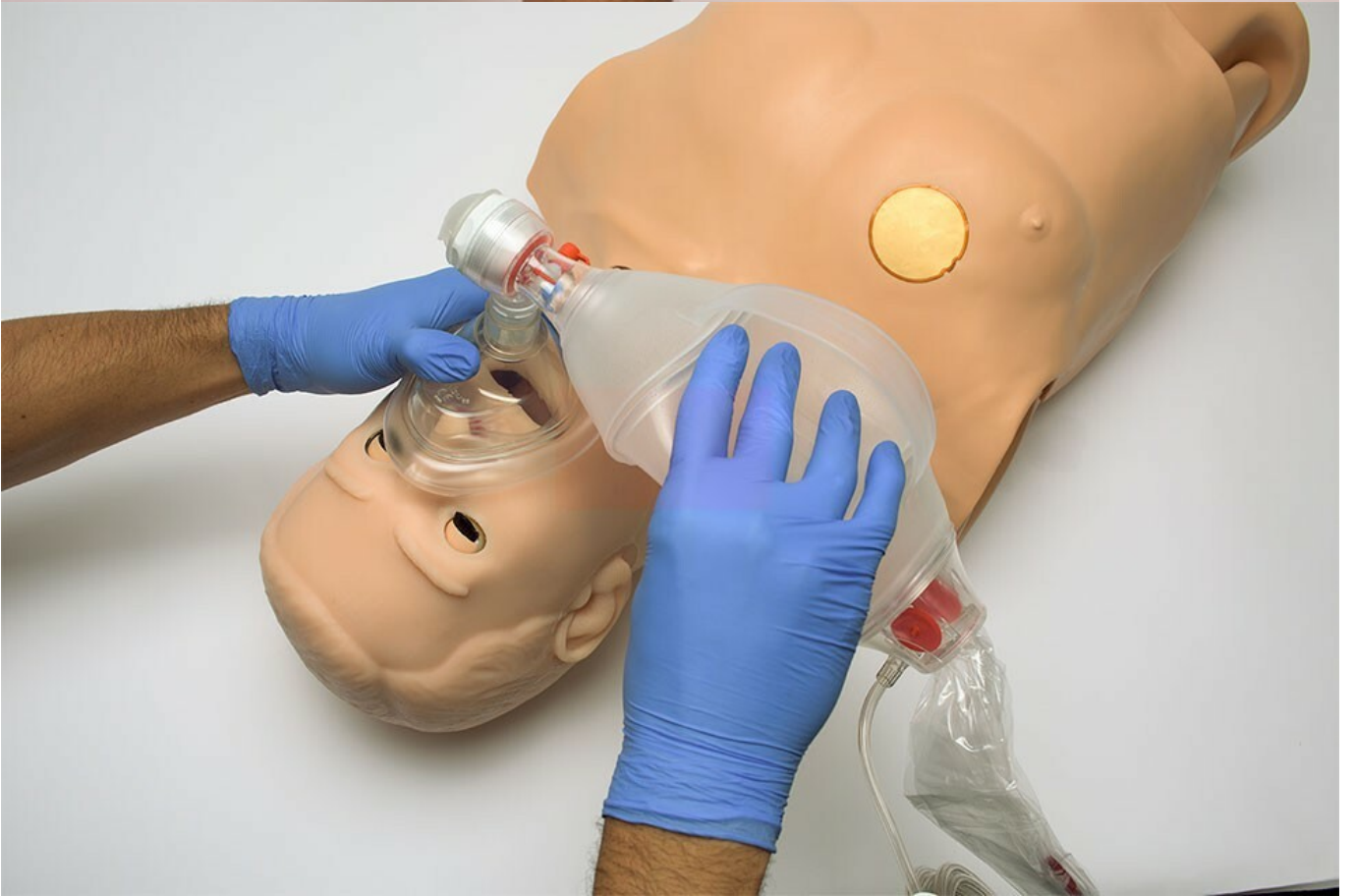





Více obrázků

Cena bez DPH

4.080,00 Eur

Cena s DPH

4.896,00 Eur

Parametre

Prevedenie

Torzo dospelého

Množstevná jednotka

ks

- Detailný popis

Inovatívna zelená technológia Gaumard umožňuje HAL® Adult CPR+D Skill Trainer Torso ukladať energiu generovanú kompresiou hrudníka do batérie pre prevádzku simulátora. Bez použitia batérií alebo napájacích káblov je HAL schopný zaznamenávať metriky kvality a výkonu KPR, predstavujúce realistické zdvihnutie hrudníka a hmatateľné pulzy po resuscitácii a ďalšie. Preneste svoj tréning na viac miest a oslovte viacej ľudí s pohodlím skutočne bezdrôtovej technológie.

Funkcie

- Dýchacie cesty s jazykom, hlasivkami a priedušnicou s možnosťou intubácie
- Oči možno otvoriť alebo zatvoriť
- Normálne zornice, mióza (zúžené) a mydriáza (rozťahnuté)
- Nezávislé stavy ľavej/pravej zornice simulujú konsenzuálnu a nekonsenzuálnu reakciu
- Realistický sklon hlavy/zdvih brady a prítlak čelustí
- Realistická hrudná dutina umožňuje študentom zažiť správnu silu potrebnú k vykonaniu správneho stlačovania hrudníka
- Anatomicky správne orientačné body pre správne umiestnenie rúk
- Pripojte skutočné elektródy AED priamo na vodivú kožu a šokujte simulátor pomocou defibrilátora rovnako ako skutočného pacienta. Váš AED zobrazí EKG simulátora.
- Automatické pulzy a dýchanie s realistickým zdvíhaním hrudníka.

Alternatívna energia

- Elektronika poháňaná stlačovaním hrudníka; 30 kompresí uvedie systém do prevádzky.
- Simulátor zostáva počas tréningu nabitý a sám sa dobíja, zatiaľ čo študent cvičí KPR.
- Žiadne batérie k výmene. Zariadenie pre ukladanie energie schopné 500 000 cyklov.

Počas nácviku

Pre študentov:

- Režim Coach: počuteľné tóny vedú stlačovanie hrudníka
- Testovací režim: počas testu nie sú poskytované žiadne pokyny

Pre inštruktora:

- Obrazovka na ručnom ovládači zobrazuje hĺbku kompresie a objem ventilácie v ľahko interpretovateľnom formáte stĺpcového grafu
- Obrazovka vyzve inštruktora, keď musí študent stláčať „rýchlejšie“ alebo „pomalšie“, „hlbšie“ alebo „menej hlboko“.
- Inštruktor môže zobrazíť mieru kompresie v reálnom čase
- Obrazovka zobrazí energiu podaného defibrilačného výboja

Po nácviku

Inštruktor sleduje výkon študentov vrátane:

- Priemerná rýchlosť kompresíí za minútu
- Percento kompresíí v správnom rozsahu rýchlosti
- Priemerná hĺbka kompresie
- Percento stlačení v správnom rozsahu hĺbky
- Percentuálna ventilácia v správnom rozsahu objemu ventilácie
- Skutočný pomer kompresie/ventilácie (C/V)
- Dĺžka cvičenia
- Doba nečinnosti
- Metriky hlásenia sú uložené vo flash pamäti ovládača a možno ich preniesť do počítača pomocou portu USB ovládača.

Ovládanie

- Úprava/zmena spätnej väzby a matrík prehľadov:
- Správny pomer C/V
- Limity pomalej a rýchlej kompresie
- Vysoké a nízke limity hĺbky kompresie (v palcoch alebo centimetroch)
- Správny objem ventilácie
- Manuálna kardioverzia po defibrilácii
- Programujte rytmy EKG; zvolte sinus, ventrikulárnu fibriláciu alebo asystóliu. Vybraný rytmus EKG bude vidieť na vašom skutočnom AED.
- Aktivujte automatický krčnicový pulz a/lebo dýchanie

Sada obsahuje

- Hlava a horná časť tela dospelého muža v životnej veľkosti
- Ručný ovládač s káblom 4,5 m
- Prenosná taška
- Návod k obsluhu

Chcete stránku vytlačiť?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobrazíť všetko