


**P93B-S - Katetrizačná sada BASIC**  
Objednávací kód: **4111.1020842**

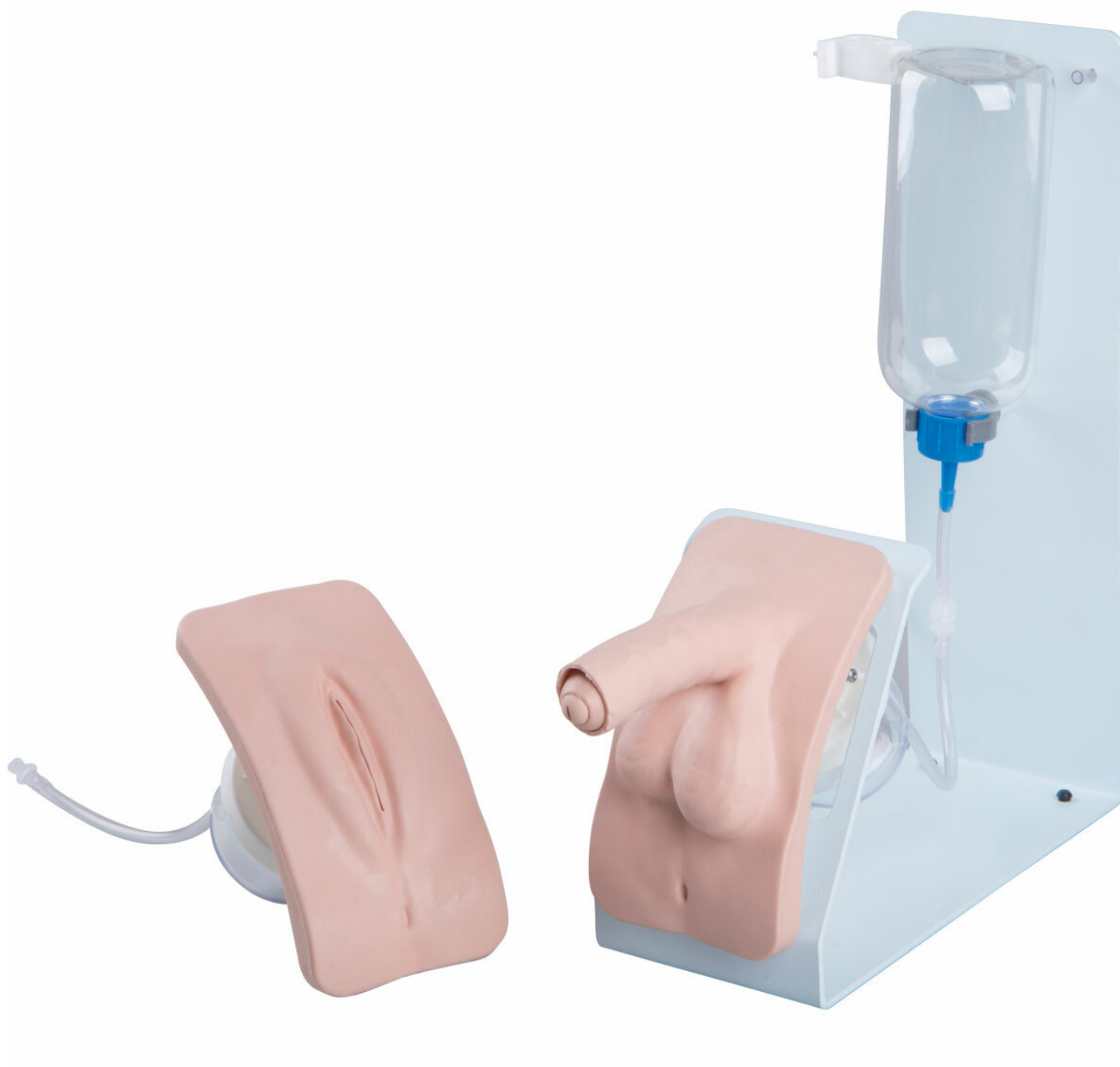

Cena bez DPH

708,00 Eur

Cena s DPH

849,60 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

S touto katetrizační nácíkovou sadou BASIC lze realisticky demonstrovat, nacvičovat a vyhodnocovat katetrizační postupy jak mužského, tak ženského močového měchýře. Snadno vyměnitelné genitálie jsou vloženy do držáku, který genitální vložku drží pomocí magnetů. Obě genitální vložky jsou vyrobeny z měkkého materiálu. S předkožkou a pysky lze pohybovat a penis je pružný. Studenti tak mohou nacvičovat všechny kroky nutné k provedení katetrizace (např. dezinfekci). Díky materiálu genitálních vložek je pocit při zavádění a vyndávání katétru z měchýře velmi realistický s realistickým odporem a hloubkami zavedení.

#### **Přímá výuka:**

Když je katétr správně zaveden, tekutina začne vytékat, jako u reálného pacienta. Katétr lze také kdykoliv sledovat přes průhledný měchýř.

#### **Různé úrovně obtížnosti:**

U mužské genitální vložky je možné nastavit tři různé úrovně zúžení močovodu. Při nejužším nastavení není možné provést katetrizaci, což vede k závěru, že je nutné použít suprapubický katétr.

#### **Výhody katetrizačních simulátorů BASIC v několika bodech:**

- Ženská a mužská katetrizace s realistickým odporem
- 3 úrovně nastavení zúžení močovodu
- Měkká a pohyblivá předkožka a pysky
- Výtok tekutiny po správném provedení katetrizace
- Situaci lze pozorovat díky průhlednému měchýři
- Protiskluzové nohy zajišťují stabilitu simulátoru
- Magnetické konektory pro rychlé připojování a odpojování genitálních vložek
- Snadné čištění

#### **Sada obsahuje:**

- Stojan s magnetickými konektory pro genitální vložky
- Sada pro mužskou a ženskou katetrizaci s průhledným močovým měchýřem
- Lahev a trubicové konektory

#### **Poznámka:**

Pro katetrizaci doporučujeme použít katétr pouze s jedním nebo dvěma navzájem opačnými sacími očky. Lze použít silikonový i PVC katétr. Doporučujeme následující katétr:

- Zúžení močovodu v poloze „otevřený“ = 16 CH katétr nebo 14 CH balónkový katétr
- Zúžení v poloze „částečné zúžení“ = 14 CH katétr nebo 12 CH balónkový katétr

#### **Nepoužívejte katétr se zahnutou špičkou!**

#### **Tip:**

Podle směrnic pro správnou katetrizaci, a to i během simulace, by měl být močovod lubrikován lubrikačním gelem (není obsažen v sadě) pro zajištění hladkého zavedení katétru. Lubrikační gel lze také nanést na špičku katétru.