

**P93B-F - Simulátor pre nácvik ženskej
katetrizácie BASIC**

Objednávací kód: **4111.1020231**



Cena bez DPH

418,00 Eur

Cena s DPH

501,60 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

S tímto katetrizačním simulátorem BASIC lze realisticky demonstrovat, nacvičovat a vyhodnocovat katetrizační postupy ženského močového měchýře. Genitální vložka je umístěna do držáku, který ji drží pomocí magnetů. Materiál genitální vložky je měkký a pružný: Pysky jsou pohyblivé a lze je roztahovat. Studenti tak mohou nacvičovat všechny kroky nutné k provedení katetrizace (např. dezinfekci). Díky materiálu genitální vložky je pocit při zavádění a vyndávání katétru z měchýře velmi realistický s realistickým odporem a hloubkami zavedení.

Přímá výuka:

Když je katétra správně zavedena, tekutina začne vytékat, jako u reálného pacienta. Katétra lze také kdykoliv sledovat přes průhledný měchýř.

Výhody katetrizačních simulátorů BASIC v několika bodech:

- Ženská katetrizace s realistickým odporem
- Měkké a pohyblivé pysky
- Výtok tekutiny po správném provedení katetrizace
- Situaci lze pozorovat díky průhlednému měchýři
- Protiskluzové nohy zajišťují stabilitu simulátoru
- Magnetické konektory pro rychlé připojování a odpojování genitální vložky
- Snadné čištění

Sada obsahuje:

- Stojan s magnetickými konektory pro genitální vložky
- Sada pro ženskou katetrizaci s průhledným močovým měchýřem
- Lahev a trubicové konektory

Poznámka:

Pro katetrizaci doporučujeme použít katetry pouze s jedním nebo dvěma navzájem opačnými sacími očky. Lze použít silikonový i PVC katétra. Doporučujeme následující katetry:

- Zúžení močovodu v poloze „otevřený“ = 16 CH katétra nebo 14 CH balónkový katétra
- Zúžení v poloze „částečné zúžení“ = 14 CH katétra nebo 12 CH balónkový katétra

Nepoužívejte katetry se zahnutou špičkou!

Tip:

Podle směrnic pro správnou katetrizaci, a to i během simulace, by měl být močovod lubrikován lubrikačním gelem (není obsažen v sadě) pro zajištění hladkého zavedení katétru. Lubrikační gel lze také nanést na špičku katétru.