

**P93SPC-F - Simulátor pre nácvik ženskej
katetrizácie PRO**

Objednávací kód: **4111.1023008**



Cena bez DPH

1.210,00 Eur

Cena s DPH

1.452,00 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

P93 PRO, trenažér pre ženskú katetrizáciu, je možné použiť pre realistickú ukážku, nácvik a vyhodnotenie katetrizácie močového mechúra u ženy, a to ako cez močovú trubicu, tak cez brušnú stenu.

Genitálne vložky sú umiestnené v anatomicky presnej spodnej časti brušného modelu a sú prichytené pomocou magnetov. Materiál je mäkký a flexibilný: s pyskami je možné pohybovať a je možné ich od seba oddeliť. Tatu môžu študenti nacvičovať všetky nutné kroky pre katetrizáciu (napr. dezinfekciu). Materiál dáva užívateľovi pri zavádzaní a vyberaní katétru do a z mechúra realistický pocit vďaka realistickému odporu a hĺbke zavedení.

Príma výučba:

Po správnom za vedení katétru začne vytekať tekutina ako u reálneho pacienta. Katéter je možné tiež pozorovať cez transparentný mechúr. Brušnú stenu verzie PRO je možné odstrániť pre lepšiu možnosť vizualizácie postupu počas katetrizácie močovodu.

Výmena a zavádzaní suprapubického močového katétru:

Pokiaľ už nie je možná katetrizácia cez močovú trubicu, je nutné zaviesť suprapubický katéter. Suprapubický katéter zvyčajne lekár zavádza cez brušnú stenu do naplneného močového mechúra a fixuje ho k brušnej stene. Verziu PRO je možné použiť pre nácvik výmeny suprapubického katétru a starostlivosti o neho. Nácvik starostlivosti obsahuje výmenu obväzu, čistenie katétru a dezinfekciu rany.

Prehľad všetkých výhod P93 PRO simulátoru pre ženskú katetrizáciu:

- Ženská katetrizácia s realistickým odporom
- Mäkké a pohyblivé pysky (napríklad pre nácvik dezinfekcie)
- Anatomicky realistická štruktúra panve
- Výtok tekutiny pri správnom prevedení katetrizácie
- Je možné pozorovať transparentný mechúr a brušnú stenu je možné odstrániť
- Nácvik výmeny suprapubického katétru a jeho čistenie a starostlivosť o neho
- Možnosť bezpečného postavení na stôl vďaka neskľzovým nohám
- Magnetické konektory pre rýchlu prípravu a demontáž
- Ľahké čistenie a údržba, možné kompletne rozložiť

Obsah dodávky:

- Realistický model spodnej časti brucha
- Súprava pre ženskú katetrizáciu s transparentným mechúrom
- Fľaša a trubicové konektory
- Prenosný obal

Poznámka:

Pre katetrizáciu odporúčame použiť katétre iba s jedným alebo dvoma opačnými sacími očkami. Je možné použiť silikónový aj PVC katéter. Odporúčame nasledujúce katétre:

- Zúženie močovodu v polohe „otvorený“ = 16 CH katéter, alebo 14 CH balónikový katéter
- Zúženie v polohe „čiastočné zúženie“ = 14 CH katéter, alebo 12 CH balónikový katéter

Nepoužívajte katétre so zahnutou špičkou!

Tip:

Podľa predpisov pre správnu katetrizáciu, a to aj počas simulácie, by mal byť do močovodu zavedený lubrikačný gél (nie je súčasťou sady) pre zaistení bezproblémového zavádzania katétru. Ako alternatívu môžete lubrikačný gél naniesť na špičku katétru.